


Macchina per pressoterapia con coperta Presso-SW

Caratteristiche tecniche

Tensione	Frequenza	Potenza
100-110 V	50 HZ	50 W
220-240 V	60 HZ	

Contenuto

Nome dell'articolo	Quantità
Unità centrale	1
Vestito, composta da: stivale destro stivale sinistro gambale destro gambale sinistro manica destra manica sinistra vita (fascia addominale)	1
Coperte e tubi a pressione	1
Fusibile e cavo di alimentazione	1
Istruzioni	1

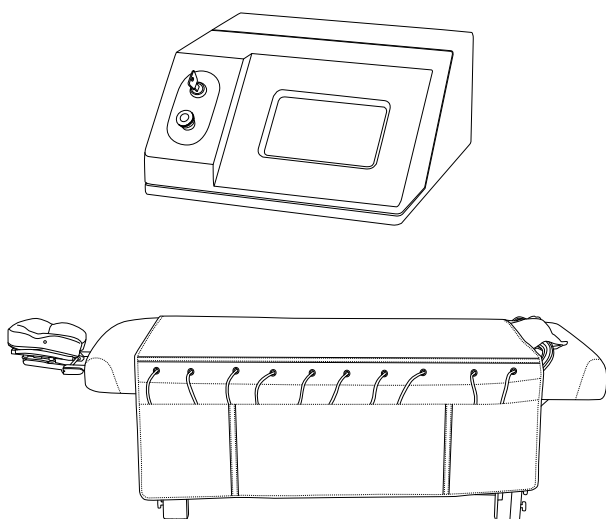


Avvertenza


1. Leggere il manuale dell'utente prima di utilizzare la macchina.
2. Non permettere che alcun liquido entri in contatto con la macchina. Fare attenzione ai collegamenti elettrici.
3. Le donne incinte e le persone con epilessia, pacemaker, gravi condizioni psicologiche o mediche o infezioni nella zona trattata dovrebbero evitare di utilizzare questa macchina.
4. In caso di malfunzionamento, controllare i collegamenti dei tubi di mandata.
5. Pulire e sterilizzare la tuta dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per il montaggio e la messa in servizio


1. Chiave d'emergenza e pulsante di arresto
Per avviare l'unità centrale, girare la chiave in posizione ON. Verificare che il pulsante rosso di arresto di emergenza non sia premuto. Nel caso in cui fosse premuto, estrarlo.

2. Ordine di connessione dei tubi di pressione sul "vestito"

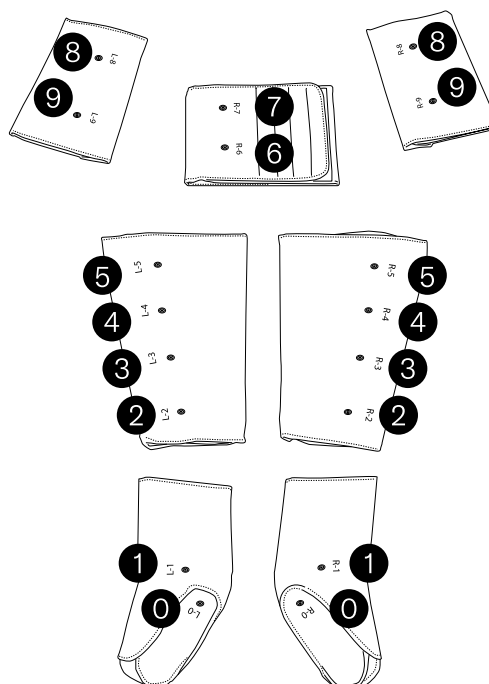

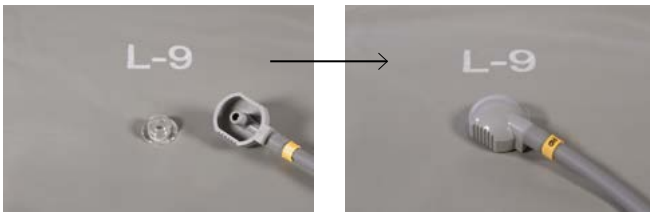


3. Collegamenti elettrici e di pressione

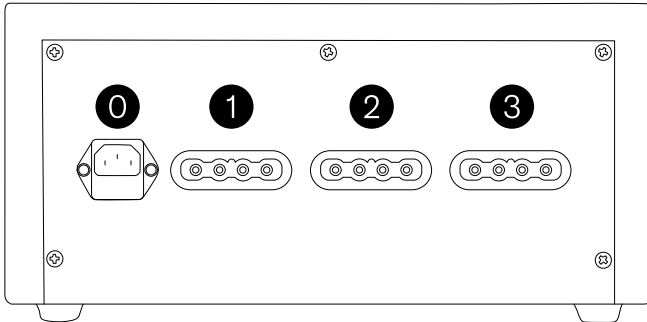

0 Alimentazione

1 2 3 Collegamenti per tubi dell'aria dall' 1 al 3, da sinistra a destra

4. Schermo dell'unità centrale

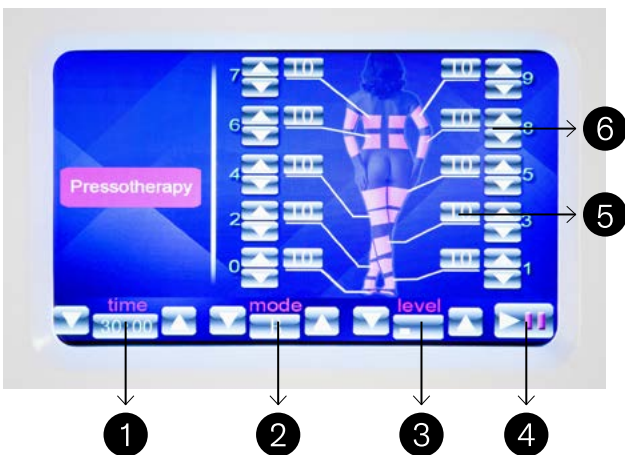

1 Visualizzazione e regolazione del tempo

2 Visualizzazione e impostazione della modalità

3 Visualizzazione e regolazione dell'intensità della pressione

4 Avviare o mettere in pausa il funzionamento della macchina

5 Premere fino a quando appare "- -", l'area corrispondente non si gonfierà

6 Regolazione del tempo di gonfiaggio per ogni parte (in secondi)

5. Azioni raccomandate

- 1) Collegare l'alimentatore, assicurandosi che l'installazione sia di 220 o 110 V.
- 2) Collegare i tubi di gonfiaggio. Controllare i numeri contrassegnati sulle connessioni.
- 3) Controllare la modalità indicata (ci sono 4 modalità)

• In modalità A (trattamento leggero linfatico): gonfia il sacchetto 0, sgonfia lo 0 e gonfia l'1, sgonfiare l'1 e gonfia il 2 fino ad arrivare al 9. Quindi gonfia gli air bag da 0 a 9 contemporaneamente e li sgonfia. Al termine, ripete il programma.

• In modalità B (normale trattamento linfatico): si gonfia 0, si gonfia 1, si sgonfia 0 e mantiene gonfia la 1 e si gonfia 2, si sgonfia 1 e mantiene gonfia 2 e si gonfia 3 fino ad arrivare al 9. Quindi gonfia simultaneamente gli air bag da 0 a 9 e li sgonfia. Al termine, ripete il programma.

• In modalità C (normale trattamento linfatico): Si gonfiano i sacchetti d'aria da 0 a 9, lo 0 continua a gonfiarsi quando l'1 si gonfia, lo 0 e 1 si gonfiano ancora quando il 2 si gonfia; continua gonfiandosi lo 0, 1 e 2 si gonfiano quando si gonfia il 3, si gonfia e lo 0 si gonfia ancora, 1, 2 e 3 quando si gonfia il 4. Infine, ripetere il programma.

• In modalità D (modalità di rilassamento), la macchina gonfia le tre file contemporaneamente.

"0" "1" "2" "3" "4" "5"

"6" "7" "6" "7" "6" "7"

"9" "8" "9" "8" "9" "8"

Infine, ripete il programma.

Si consiglia di selezionare la modalità C all'inizio, quindi scegliere altre modalità richieste dall'utente.

Manutenzione del "vestito"

1. Aprire il "vestito" per pulirlo dopo ogni utilizzo.
2. Prestare attenzione alle connessioni, non tirare eccessivamente i tubi o piegarli troppo.

→
REF. AT104911
PRESSOTERAPIA



CARATTERISTICHE TECNICHE



Potenza:	50 W
Frequenza:	50/60 Hz
Tensione:	220-240 V
Peso:	15 kg

INCLUDE



- Unità di controllo digitale
- Impostazioni di tempo e pressione
- 4 modalità operative (selezione personalizzabile dell'area del vestito)
- Vestito: 2 gambali, 2 stivali, 2 braccia e fascia addominale.
- Coperta e tubi a pressione

CERTIFICAZIONI



- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility
- 2014/35/EU Low Voltage Directive
- 2011/65/EU Rohs