

ALTA FREQUENZA

AVVERTENZE

• Non aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchio. Qualora fosse necessaria un'ispezione, contattare il fornitore o un tecnico specializzato.

• Non utilizzare mai l'apparecchio in ambienti umidi o poco ventilati, in modo da prevenire eventuali danni agli elementi elettrici.

• Non utilizzare mai l'apparecchio all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarlo.

• Qualora il cavo elettrico fosse rotto o danneggiato, chiederne la sostituzione da parte di un professionista per evitare rischi, oppure contattare il fornitore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

1. Le misure della Direttiva di bassa tensione: 2014/35/EC

2. Le misure della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EC

RICICLAGGIO

 Il seguente simbolo, se presente su uno degli apparati elettrici o nell'imballaggio, indica che tali prodotti non possono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un adeguato trattamento dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento delle apparecchiature elettriche. Tale procedimento è necessario per aiutare a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale d'istruzioni. È, inoltre, consigliato seguire le indicazioni di un professionista per assicurarsi di utilizzare l'apparecchio correttamente.


L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti a un utilizzo non corretto dell'apparecchio. L'Azienda si riserva, inoltre, il diritto di modificare o correggere informazioni sulle apparecchiature senza previo avviso. Qualora si dovessero riscontrare errori nelle presenti istruzioni, vi preghiamo di inviarci un'e-mail affinché possiamo correggerli.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO


• I seguenti elementi possono essere soggetti a modifiche senza previo avviso.

• L'aspetto del prodotto può differire dall'immagine.


N°	PRODOTTO	REF.	QUANT.
1	ELETTRODO 1		1
2	ELETTRODO 2		1
3	ELETTRODO 3		1
4	ELETTRODO 4		1
5	COMANDO ALTRA FREQUENZA		1
6	UNITÀ PRINCIPALE	-	1
7	CAVO ALIMENTAZIONE - ELETTRICA	-	1

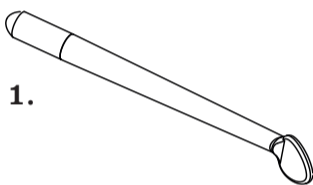


1.

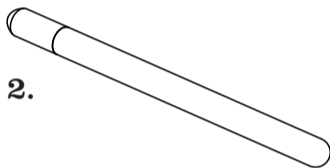


2.

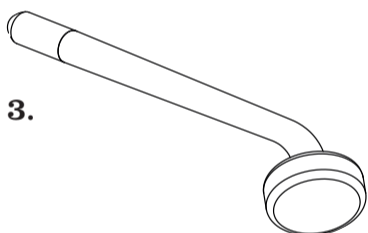


3.

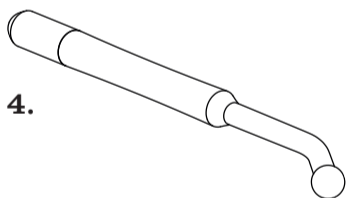


4.

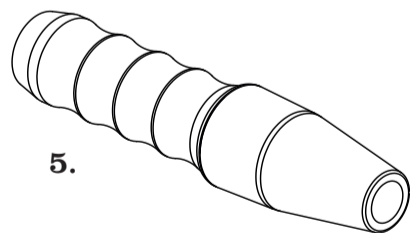

5.

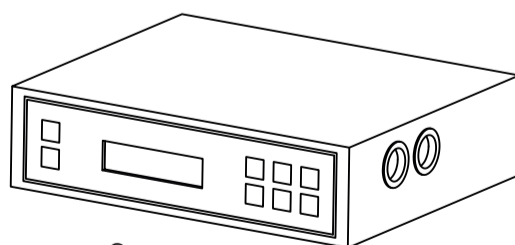


6.

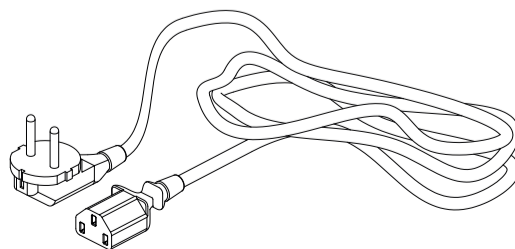

7.


PANNELLO FRONTALE

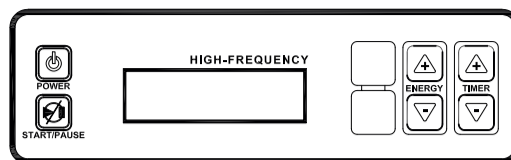

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Inserire la presa del cavo di alimentazione nell'apposito collegamento sul pannello posteriore.

2. Connettere gli accessori correttamente sul pannello laterale.

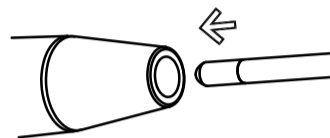

3. Scegliere l'elettrodo di cristallo adeguato ed inserirne l'estremo di metallo nell'apposita fessura, situata sul manico (stare attenti a non toccare l'elettrodo di vetro con le mani o con oggetti metallici).

Scelta degli elettrodi:

a. Elettrodo a forma di fungo: indicato per zone estese di pelle (viso, fronte, collo). fig. 3

b. Elettrodo a forma di vanga: per zone intermedie del viso (mento). fig. 1

c. Elettrodo con estremo a forma di sfera: usato per piccole zone della pelle (naso). fig. 4

d. Elettrodo a forma di tubo: per il trattamento indiretto. fig. 2

4. Mettere in azione l'apparecchio attraverso il tasto "POWER" ed assicurarsi che il comando potenza "ENERGY" sia situato al livello minimo.

5. Selezionare il tempo di trattamento desiderato attraverso il pulsante "TIME".

6. Premere il tasto di accensione "START / POWER" per iniziare il trattamento.

7. Assicurarsi di porre il dito sul vetro dell'elettrodo prima di qualsiasi tipo contatto con la pelle del cliente: in seguito, mettere l'elettrodo di vetro in contatto con la zona da trattare. A questo punto regolare la potenza a poco a poco tramite il manipolo alta frequenza "ENERGY".

8. Qualora fosse necessario cambiare elettrodo durante il trattamento, diminuirne la potenza al livello minimo, per poi regolare il livello moderatamente fino a raggiungere l'intensità desiderata.

9. Al termine del trattamento regolare gradualmente il comando "H/ENERGY" fino a raggiungere livello minimo di potenza. Quindi, spegnere l'apparecchiatura tramite il tasto "POWER" prima di rimuovere l'elettrodo dal viso del cliente.

USO INDIRETTO

1. Selezionare l'elettrodo a forma di tubo ed inserirlo nell'apposito manico.

2. Dare il manico al cliente, assicurandosi che lo tenga dalla parte del cristallo.

3. Accendere l'apparecchio tramite il tasto "POWER" ed assicurarsi che il comando di potenza "ENERGY" sia al minimo livello.

4. Selezionare la durata del trattamento attraverso il tasto "TIME".

5. Premere il pulsante di accensione "START/STOP" per iniziare il trattamento.

6. Selezionare gradualmente la potenza desiderate tramite il comando "ENERGY".

7. Realizzare il massaggio facciale o il trattamento con il prodotto adeguato. Durante il trattamento, assicurarsi di non toccare l'elettrodo di cristallo tenuto dal cliente.

8. Alla fine del trattamento, ridurre lentamente il comando "ENERGY" alla potenza minima, dopodichè spegnere l'apparecchio tramite il tasto di accensione/spegnimento "POWER".

PRECAUZIONI

• Il polo dell'elettrodo di cristallo, se acceso, produce una scintilla quando si trova a meno di 2,5 cm di distanza dalla pelle. In questo caso è necessario ridurre l'energia. Qualora il cliente dovesse avvertire ancora la scintilla, coprirgli il viso con un panno secco di cotone (mai utilizzare materiale di nylon o sintetico).

• Prima di sollevare l'elettrodo di cristallo dalla pelle del cliente, diminuire l'energia riportando il comando potenza "ENERGY" al valore minimo e spegnere la corrente.

SCHEDA TECNICA

Peso e dimensioni	Dimensioni imballaggio (cm)	37x27,5x14
	Peso lordo (Kg)	2,7
	Dimensioni consola (cm)	20,7x22x7
Caratteristiche di lavoro	Potenza di lavoro	12 W
	Frequenza di lavoro	180 KHz
	Tempo di lavoro prestabilito	15 min
Caratteristiche elettriche	Voltaggio nominale	220V ~ 240V
	Frequenza	50Hz/60Hz
	Potenza nominale	10 W

• È assolutamente vietato, per il paziente, indossare oggetti metallici o gioielli: avvisarlo di toglierli prima di iniziare qualsiasi tipo di trattamento.

• È vietato effettuare qualsiasi tipo di trattamento ad alta frequenza su donne in stato di gravidanza o persone dotate di stimolatori cardiaci (o qualsiasi altro apparecchio elettrico di ausilio al cuore).

• I prodotti usati nel trattamento di alta frequenza non devono contenere alcool né liquidi a base di spirito, per prevenirne la combustione accidentale dovuta alla formazione dell'arco elettrico.

• Stare attenti a non mettere in contatto l'interno dell'occhio (globo oculare) con un elettrodo di alta frequenza.

• Reggere l'apparecchiatura esclusivamente dalla parte del manico.

MANUTENZIONE

• È indispensabile mantenere gli elettrodi di cristallo puliti ed asciutti e sterilizzarli prima e dopo il loro utilizzo.

ACCESSORI

REF.	DESCRIZIONE
	ELETTRODO 1
	ELETTRODO 2
	ELETTRODO 3
	ELETTRODO 4
	ELETTRODO SPECIALE 1
	ELETTRODO SPECIALE 2
	ELETTRODO SPECIALE 3
	MANIPOLO ALTA FREQUENZA